

LIFELINKcentral™ AED Program Manager

Einsatzbereitschaft ist wichtig.



Übernehmen Sie die Kontrolle mit einer vollständigen, vernetzten Lösung für das AED- Programmmanagement.

AEDs funktionieren.

Aber nur wenn sie einsatzbereit sind.

Ein plötzlicher Herzstillstand kann jedem widerfahren—jederzeit und überall. Aus diesem Grund sind öffentlich zugängliche Defibrillatoren so wichtig. Sie stellen eine lebensrettende Technologie zur Verfügung, wo sie am meisten bewirken kann. Allerdings war eine ständige Systemwartung bisher zeitaufwendig und fehleranfällig—das ändert sich jetzt.

Mit LIFELINKcentral AED Program Manager ist das Verwalten Ihrer AEDs jetzt einfacher und genauer als je zuvor. Sie erhalten nicht nur die Gewissheit, dass Ihre AEDs bereit sind, wenn sie benötigt werden, Sie sparen auch Zeit und Geld beim AED-Programmmanagement, da manuelle Prüfungen bei vernetzten Geräten unnötig werden und die Statusverfolgung selbst von nicht vernetzten Geräten effizienter wird.

Vernetzt und bereit.

Mit dem LIFEPAK CR2 Defibrillator, einem über W-LAN® oder Mobilfunknetz verbundenen AED, ermöglicht der LIFELINKcentral Program Manager die selbständige Verwaltung. Standort, Batteriestand und weitere Bereitschaftsinformationen werden von der Software automatisch abgerufen, damit eine einfache Verwaltung über das Online-Dashboard* möglich ist—egal ob Sie einen AED oder 100 an einem einzigen Standort oder über Tausende Kilometer verteilt haben. Der LIFELINKcentral AED Program Manager sendet sogar Meldungen zu Zuständen, die Auswirkungen auf die Bereitschaft des AEDs haben.



Für jeden vernetzten LIFEPAK CR2 können Sie:

- Bereitschaftsinformationen fern überwachen
- Standort auf einer Landkarte anzeigen sowie Standortänderungen erkennen
- Meldungen zu Situationen empfangen, die Auswirkungen auf die Bereitschaft haben, wie Batteriestand
- Dashboard mit dem Status aller vernetzten AEDs anzeigen*
- Meldungen empfangen, wenn ein AED verwendet wurde
- Ereignisdaten zu einem plötzlichen Herzstillstand über W-LAN an eintreffendes Rettungspersonal senden
- Ereignisdaten und -berichte automatisch an ein Krankenhaus und medizinisches Versorgungspersonal senden
- Benachrichtigungen erhalten, wenn Batterien oder Elektroden kurz vor dem Verfallsdatum stehen oder bereits verfallen sind
- Alles ohne manuelle Überprüfung

Komplettes Verwaltungssystem.

Sie können alle Ihre AEDs mit LIFELINKcentral AED Program Manager verwalten, selbst die nicht vernetzten. Geben Sie einfach die Geräteinformationen manuell ein und aktualisieren Sie dann regelmäßig die Prüfdaten. Dadurch erhalten Sie eine vollständige Dokumentation der Bereitschaftsdaten. Sie können die Geräte sogar auf einer Landkarte lokalisieren und Meldungen für einen geplanten Batterie- oder Elektrodenwechsel erstellen.*

Ein Plan für jedes AED-Programm.

Jeder LIFEPAK CR2 Defibrillator umfasst einen Standardzugang zum LIFELINKcentral AED Program Manager, aber es gibt zahlreiche Gründe für eine Investition in ein vollständiges Servicepaket.

| | STANDARD | ADVANTAGE | PREMIUM | TRACK |
|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Unterstützte AEDs | | | | |
| LIFEPAK CR2 AED WLAN®, WLAN+3G | X | X | X | X |
| LIFEPAK CR2 AED USB | X | X | X | X |
| Physio-Control Nicht vernetzte AEDs | | X | X | X |
| Wettbewerbs AEDs | | X | X | X |
| Verfügbare Dienste | | | | |
| Portalzugang | Eingeschränkter | Vollständiger | Vollständiger | Vollständiger |
| E-Mail-Benachrichtigungen – Bereitschaft | | | | |
| LIFEPAK CR2 AED Wi-Fi, Wi-Fi+3G | X | X | X | X |
| Alle anderen AEDs, Geräte anpassen (basierend auf manuell eingegebenen Daten) | | X | X | X |
| E-Mail-Benachrichtigungen – Nutzung | | | | |
| LIFEPAK CR2 AED Wi-Fi, Wi-Fi+3G | X | X | X | X |
| ASR-Nachbereitung to E-Mail-Benachrichtigungen | | | X | X |
| Kundendienst | | | | |
| Kundendienst | X | X | X | X |
| Spezieller Kundendienstberater (ASR) | | | X | X |
| Proaktiver Überblick/Anrufe, Dashboard-Berichte und Benchmarking | | | X | X |
| Nachträgliche Dienste nach dem Ereignis | | | | |
| Nachträgliches Herunterladen von Berichten | | X | X | X |
| Überprüfung der Gerätebereitschaft | | X | X | X |
| Free Supply Replenishment | | X | X | |
| Zusätzlicher Wert | | | | |
| Kostenlose Software-Updates | X | X | X | X |
| Kostenloses Aufrüsten zu Premium Software | | | X | X |

* Die Dienste sind für LIFEPAK CR2 AED über Funknetz (Wi-Fi, Wi-Fi + 3G) sowie für alle anderen Physio-Control AEDs über Fernwartung, oder direkt vor Ort verfügbar. Dies ist jeweils länderabhängig.

Mit Sicherheit einsatzbereit.

Wir stellen uns eine Zukunft vor, in der eine bessere Technologie für bessere Ergebnisse sorgt—und für mehr gerettete Leben. Im Falle eines plötzlichen Herzstillstands wollen Sie das Beste für Ihre Mitarbeiter, Kunden, Schüler und die Öffentlichkeit.

Aus diesem Grund haben wir das einfachste und umfangreichste AED-Managementsystem entwickelt. Der LIFELINKcentral AED Program Manager automatisiert das AED-Programmmanagement für vernetzte LIFEPAK CR2 Geräte und kann verwendet werden, um alle LIFEPAK und HeartSine AEDs manuell zu verwalten. Bitte kontaktieren Sie Ihren Physio-Control Gebietsleiter, um weitere Informationen zu erhalten, oder besuchen Sie unsere Website unter www.physio-control.com.

Wenn Sie Ihren LIFEPAK CR2 Defibrillator von einem autorisierten Physio-Control Vertriebspartner oder Verkäufer erworben haben, wird dieser Zugriff auf Ihr LIFELINKcentral Program Manager Konto haben und kann möglicherweise Benachrichtigungen von Ihrem LIFEPAK CR2 Defibrillator erhalten. Bitte beachten Sie, dass diese Einstellung JEDERZEIT deaktiviert werden kann: Wenn Sie diese Einstellung deaktivieren möchten, senden Sie bitte eine Anfrage an den Kundendienst von Physio-Control, um die Einstellung „Distributor“ (Vertriebspartner) in „Customer Managed“ (vom Kunden selbst verwaltet) ändern zu lassen.

Bitte kontaktieren Sie Ihren Physio-Control Gebietsleiter für weitere Informationen oder besuchen Sie unsere Website.



Physio-Control Headquarters
11811 Willows Road NE
Redmond, WA 98052 USA
Tel 425 867 4000
www.physio-control.com

**Physio-Control Operations
Netherlands B.V.** 
Galjoenweg 68
6222 NV Maastricht
The Netherlands
Tel +31 (0)43 3620008
Fax +31 (0)43 3632001

**Physio-Control
Germany Sales GmbH**
Stresemannallee 4b
D-41460 Neuss
Tel +49 (0)2131 6617 000
Fax +49 (0)2131 6617 251
www.lifepak.de

**Physio-Control
Austria Sales GmbH**
Simmeringer Hauptstraße 24
A-1110 Wien
Tel +43 (0)1 74040 2866
Fax +43 (0)1 74040 2867
www.physio-control.at

**Physio-Control
Switzerland Sales GmbH**
c/o Intertrust Service (Schweiz) AG
Alpenstraße 15
CH-6304 Zug
Tel 0800 00 66 33 (kostenlos)
Fax 0800 00 66 44 (kostenlos)
www.physio-control.ch